


# DELTA Evolution




## ***Brugsanvisning***

***Type KR214 Ståstøttestativ med elektrisk løftefunktion og tilt.***

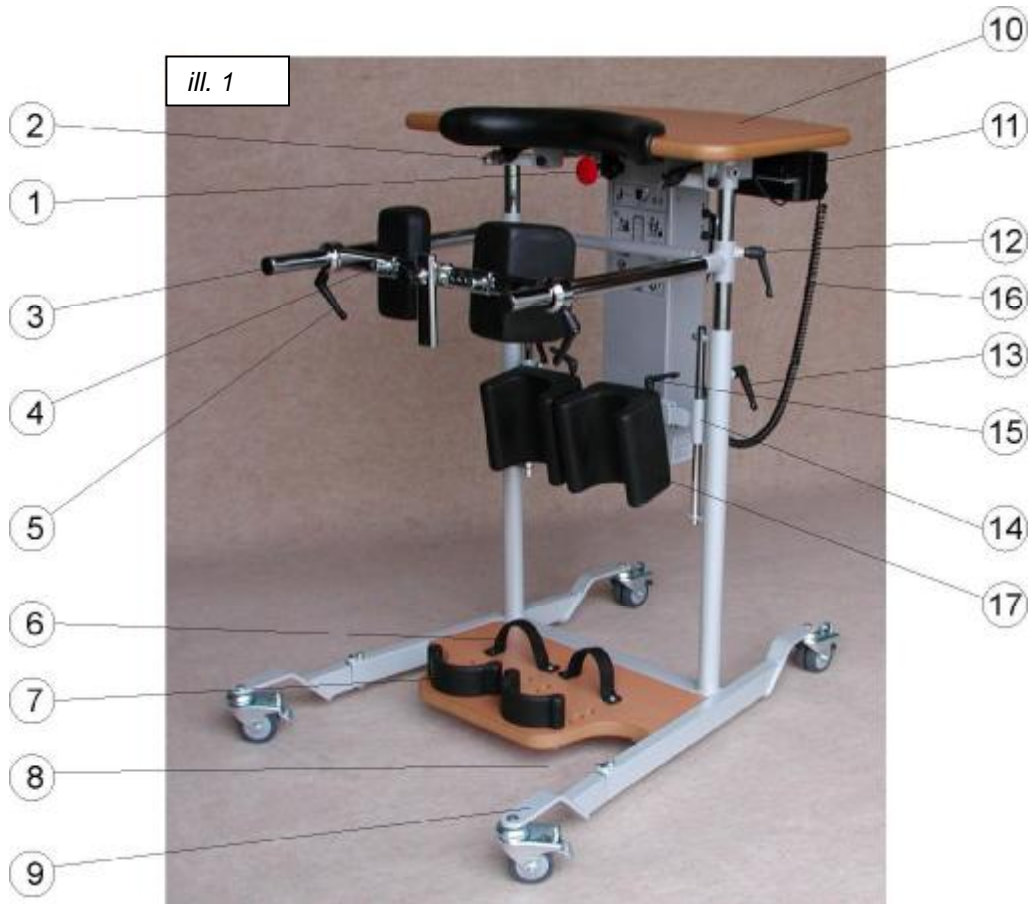

- 1 Nødstop
- 2 Løftereb med bælteføring
- 3 Arm støtte
- 4 Håndtag til horisontal indstilling af rygstøtte
- 5 Håndtag til vertikal indstilling af rygstøtte
- 6 Fodholder
- 7 Hælstøtte
- 8 Skrue til indstilling af baghjul
- 9 Indstillige baghjul

- 10 Bord med støttepude
- 11 Fjernbetjening med el-kabel
- 12 Håndtag til højde indstilling af armstøtte
- 13 Håndtag til højde indstilling af bord
- 14 Håndtag til vertikal indstilling af knæstøtte
- 15 Håndtag til horizontal indstilling af knæstøtte
- 16 Spiral cable with manual push button
- 17 Knæstøtte

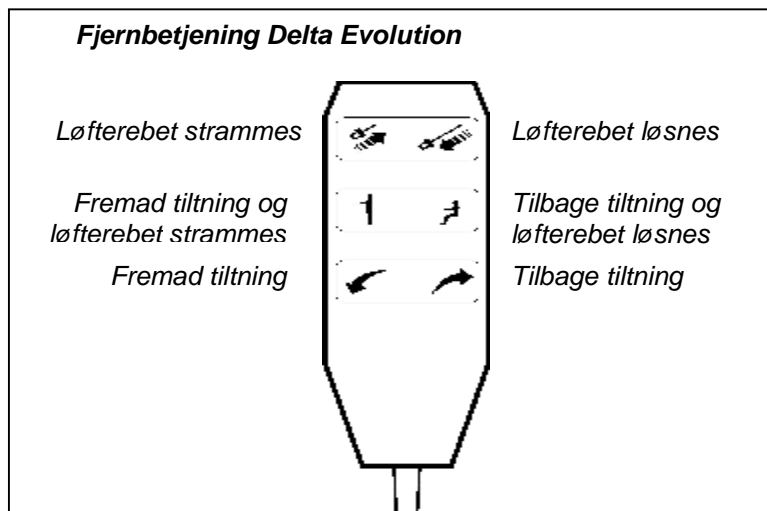

## **Indstillings instruktioner**

*Ståstøttebordet skal så vidt muligt indstilles inden brugeren benytter bordet*

*Bordet skal højdeindstilles således at støttepudep på bordet er imellem brysenbet og den øvre hoftekant*



***Bordet må under ingen omstændigheder indstilles således, at støttepuden på bordet er under den øvre hoftekant!***


### **Bord højde**

*Højdejusteringen af bordet benyttes til at tilpasse ståstøttebordet individuelt til hver bruger. Højden på bordet er indstillet korrekt, når brugeren kan hvile sine arme på bordet se ill. 2*



### **Rygstøtte**

*Hofte/ sidestøtten kan justeres i højden, ved at løsne højdeindstillingen for armstøtterne. Bredden af rygstøtten kan justeres ved at trække ud i håndtaget bag på rygstøtten se ill. 3*

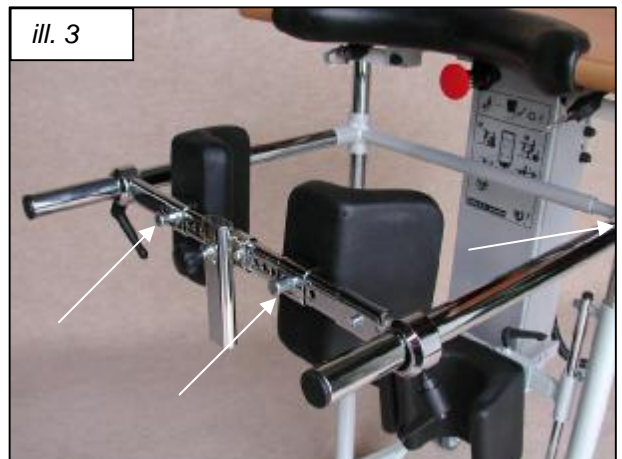

***Det er yderst vigtigt at alle håndtag der har været løsnet på grund af indstilling, strammes til igen, inden brugeren benytter bordet!***

### **Fodholder og hæl støtte**

*Fodholder og hælstøtte kan indstilles ved at flytte hælstøtten frem og tilbage i de respektive huller. Der er 4 forskellige indstillingsmuligheder*



***Det er yderst vigtigt at foden står sikkert!***

### **Knæstøtter**


Knæstøtterne kan indstilles både horisontalt og vertikalt. Knæstøttene er korrekt indstillet når de rammer lige under knæet eller lige over knæet.

### **Løftebæltet**

Brugeren skal iføres løftebæltet inden han køres hen til ståstøttebordet. Bæltet bør spændes så nedre kant af bæltet lige rammer kørestolens sæde. Herefter spændes bæltet rundt om livet.

### **Øvrige indstillinger**

Ståstøttebordets bagerste hjul kan vippe ud, således det også kan benyttes til store kørestole. Hvis denne funktion benyttes, tjek da at skruen til indstilling af baghjulene er fastspændt. se ill. 4

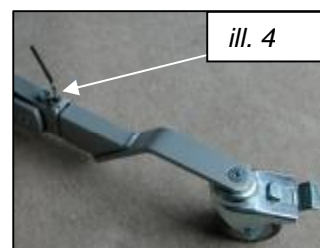

### **Teknisk data**

- |                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| • Bredde            | <b>77 cm</b>                     |
| • Længde            | <b>118 cm</b>                    |
| • Højde             | <b>99 - 127 cm</b>               |
| • Tom vægt          | <b>58 kg</b>                     |
| • Bruger højde      | <b>140 - 200 cm</b>              |
| • Max. bruger vægt  | <b>120 kg</b>                    |
| • Strøm             | <b>~230 V / 50 Hz</b>            |
| • Batteri kapacitet | <b>10 %, max. 2 min./18 min.</b> |

## **Hvordan DELTA Evolution med tilt funktion, benyttes:**


Delta Evolution giver brugeren en højere grad af komfort, da knæstøtter, fodplade og armstøtter tiltes tilbage mod brugeren. Dermed mindskes belastningen på brugerens knæ også op til 70% (ill. 9).

### **Sådan kommer brugeren op og stå:**


- Tilt ståtøttebordet tilbage ved at trykke på den markerede knap
- Fjern ben og fodstøtter fra kørestolen
- Ifør brugeren løftbæltet
- Kør kørestolen hen til ståtøttebordet, således forkanten at kørestolen rammer fodpladen. **Brems kørestolen!**
- Placer brugerens fødder i fodholderne
- Fastgør løfterebene til løftesejlet



- Stram løfterebene til, uden at lifte brugeren, ved at trykke på den markerede knap

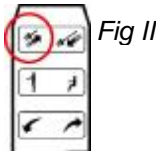

- Liftningen af brugeren startes ved at trykke på den markerede knap
- Når brugeren ikke helt op, kan løfterebene strammes yderligere ved trykke på den markerede knap i figur II

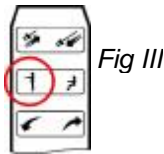

### **Sådan sættes brugeren ned igen:**

- Tryk på den markerede knap, for at sænke brugeren tilbage i kørestolen se fig. IV
- Tryk på den markerede knap for at løsne løfterebene se fig. V
- Når brugeren er væk fra ståtøttebordet kan det bringes tilbage i vertikal position ved at trykke på den markerede knap se fig. VI

