

Vejledning ved brug af Rygerobot.

For model B17 lille, og B41 stor med skruetvinge (B42)

Brugsanvisning:

- Skru slangen fast i askebægeret, og rygerobotten er nu klar til brug.
- Placere altid rygerobotten på en plan og ikke brandbar overflade, sikre samtidig at rygerobotten står stabilt og ikke kan falde ned.
- På den store model (B41) kan der monteres en skruetvinge på rygerobotten, så den kan fastspændes på bord el. lign. (købes separat).
- Sæt cigaretten i holderen, tænd den medens der suges gennem slangen.
- Resterne af den udbrændte cigaret fjernes ved at skubbe ringen/omløberen ned, og derefter kan man tage skoddet.
- Brugte slanger rengøres i varmt opvaskevand, skylles og hænges herefter til tørre. Såfremt skruenippel eller mundstykke begynder at sidde løst/ falder af, kan slangen klippes til i enderne så nippel/mundstykke kan herefter trykkes på igen.

Advarsel:

- *Rygning er forbundet med brandfare – sørg derfor altid for, at der er en hjælper i nærheden når der ryges.*

Spørgsmål stilles til Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler A/S, tlf. 8692 7955,
eller
mail: mail@bjoern-nielsen.dk